

Akcijos

Autoklavai

Dezinfekcija

Pakavimo medžiagos

Plovimo kokybės kontrolė

Sterilizacijos kontrolė

Instrumentų priežiūra ir valymas

Vandens paruošimas

Higienos produktai

Dokumentavimas

Pyromol test-as

Rinkinys baltymų likučiams ant instrumentų paviršių nustatyti

Produkto savybės:

- paruoštas naudoti
- baltymo likučiai nustatomi greičiau nei per 10 minučių
- matomas spalvos pokytis esant baltymo likučiu daugiau, kaip 1 μg
- rezultato tikslumo neįtakoja dezinfekuojančių medžiagų likučiai


Naudojimo instrukcija:

! dirbkite su pirštinėmis ! Tamponėlio sąlytis su rankų oda gali įtakoti rezultatą! Ant odos apstu baltymų likučių

- pakuotė sudaro tamponėliai ir tiek pat reagento ampulių
- tamponėliu nuvalykite tiriamą paviršių. Jei valote sausus paviršius, tamponėlį suvilgykite švariu vandeniu.
- įdėkite tamponėlį į ampulę su reagentu ir pakratykite kelis (5) kartus
- patikrinkite rezultatą po 10 minučių
- jei yra baltymo likučių, mėlynas (žydras) laukelis ant tamponėlio atsiranda po 1-5 minučių. Laukiant ilgiau reakcija tik labiau paryškėja.
- didelis baltymų likučių kiekis gali nudažyti visą ampulės skystį.


Vertinimas

mėlynas (žydras) laukelis ant tamponėlio rodo baltymo likučius

PASTABA: Kontaktas su šarminėmis medžiagomis gali įtakoti spalvos pasikeitimą. Tamponėlio kontaktas su su rankų oda gali būti spalvos pasikeitimo priežastis. Naudokite, tik pakuotėje esančius tamponėlius. Pačių pasiruošti tamponėliai, gali neigiamai įtakoti rezultatus


Praktinis pavyzdys:

Šiame pav. matote teigiamą tyrimo rezultatą. Tai reiškia, kad ant nuplautų instrumentų yra baltymo likučių. TEIGIAMAS rezultatas (pamėlynavęs tamponėlis) rodo nepakankamą plovimą. Instrumentus BŪTINA valyti pakartotinai. BŪTINA nustatyti nepakankamą plovimą priežastis ir jas pašalinti !!!


Saugojimas

Saugokite 2 - 25°C gamintojo pakuotėje. Saugokite nuo aukštos temperatūros, dezinfekantų ir chemikalų poveikio.

Galiojimas

Tinkamas naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.